
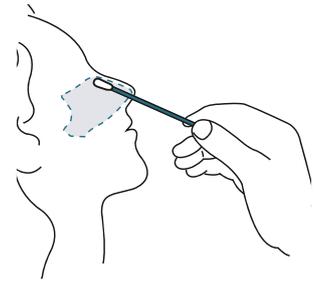


Kurzanleitung

NASOCHECKcomfort Corona-Schnelltest zur Selbstanwendung

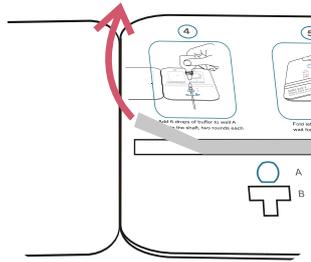

Schritt 1:


- Die Testkarte muss innerhalb **1 Stunde nach dem Öffnen** des versiegelten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile des Testkits sollten Raumtemperatur haben.

Schritt 2:

- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, gerade Unterlage legen
- Folie über dem Klebestreifen **K** entfernen


Schritt 3:

- Tupfer zuerst **2-3 cm** in die eine Nasenhöhle stecken
- Tupfer **5 Mal** im Kreis drehen
- Dann Vorgang **genauso in der zweiten Nasenhöhle wiederholen**

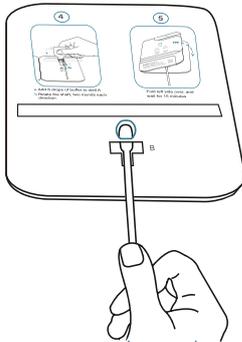


Schritt 4:

- Tupfer am Stiel halten und den Tupferkopf von unten durch die Öffnung **B** in Vertiefung **A** schieben
- Den Tupferkopf dabei nicht berühren

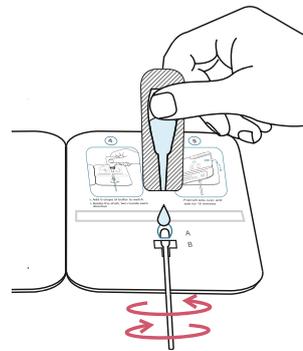

Schritt 5:

- Kopf von Lösungsfläschchen vorsichtig abdrehen und **6 Tropfen der Lösung** auf den Tupferkopf in Vertiefung **A** geben
- Danach Tupfer am Stiel **2 Mal in jede Richtung drehen**

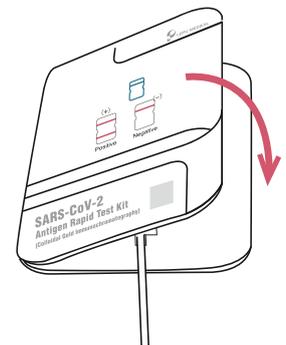


Schritt 6:

- Karte schließen, mit **Klebstreifen K zusammenkleben** & vorsichtig zusammendrücken.
- Ergebnis **nach 15 Minuten** (nicht später als 20 Minuten) auf der Vorderseite der geschlossenen Karte im **Ergebnis-Fenster** ablesen.
- Karte während der Wartezeit nicht mehr bewegen!

Ablezen des Ergebnisses:


Positiv

(+)

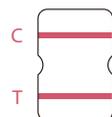


Negativ

(-)

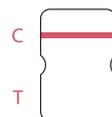

Fehlerhaft

Bitte wiederholen Sie den Test mit einem neuen Test-Kit!

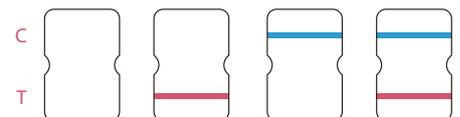

AMEFA

AMEFA GmbH
In den Fritzenstücker 9 – 11
D-65549 Limburg
Telefon +49 (0)6431-7302 200
kontakt@amefa-med.com